



Vícevrstvé lepicí dekontaminační antibakteriální rohože


1 Vyčištění, odmaštění a vysušení místa před aplikací rohože

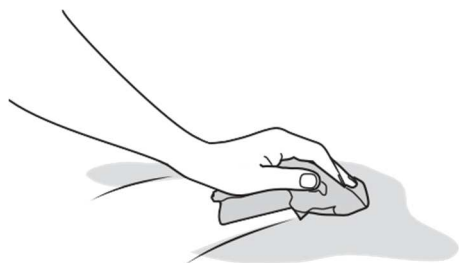


2 Odstranění spodní lepicí části

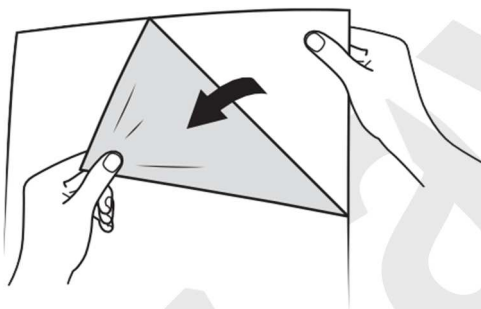


3 Uchopte jeden konec rohože jednou rukou a postupně nalepujte na zem pomocí druhé ruky

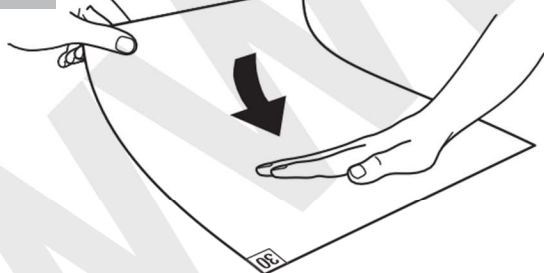

4 Pošlapat, aby rohož dobře přilnula na zem

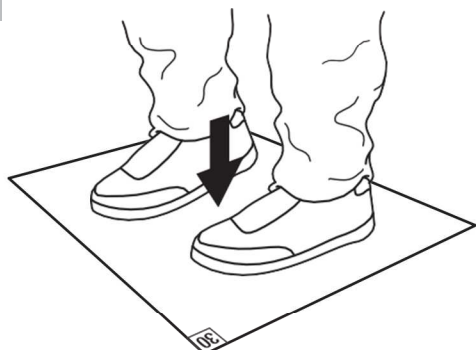


5 Před použitím strhnout svrchní ochrannou vrstvu

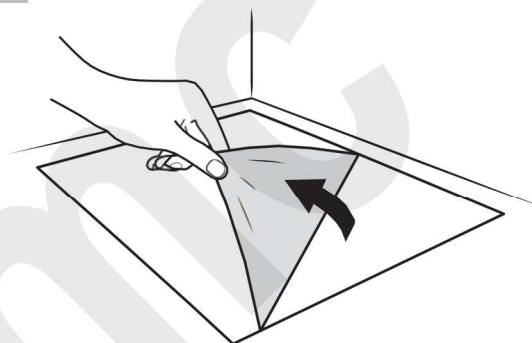


i Jakmile rohož přestane lepit, strhněte další vrstvu


Jak správně používat rohože

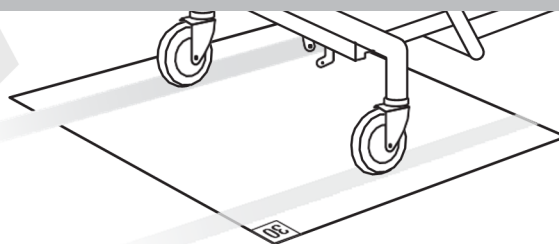

Jak správně strhávat vrstvy rohože

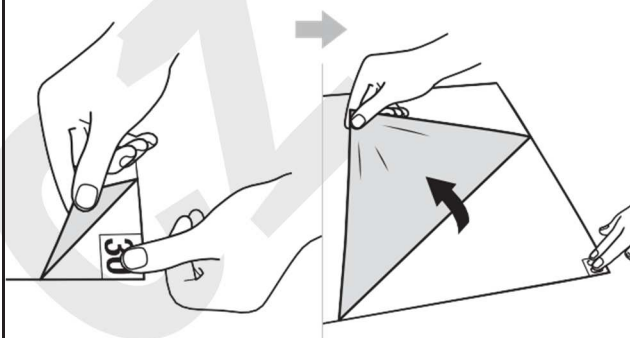

Doporučené skladování rohoží

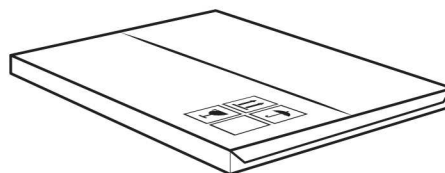

Rohože skladujte vodorovně naležato největší plochou krabice

Určený účel:

Odstraňování nečistot a bakteriální kontaminace z kol zdravotnických prostředků a z podrážek obuvi na vstupech do zón s vysokými požadavky na čistotu prostředí.

Určení uživatele:

Personál nemocnice (zdravotnického zařízení) (laické osoby nebo zdravotnický pracovník).

Upozornění:

Veškeré závažné nežádoucí příhody hlase výrobcí a příslušnému (kompetentnímu) orgánu členského státu EU, v němž jste jako uživatel usazen.

Skladování:

Rohože skladujte vodorovně naležato největší plochou krabice. Chránit před vlhkem. V temnu a suchu a ideálně při teplotě 15-25 stupňů Celsia.

Doba použitelnosti výrobku:

15 let od data výroby (uvedeno na označení/štítku).

Pro jedno použití:

Opakované použití prostředku představuje riziko infekce uživatele nebo snížené prevence infekcí spojených se zdravotní péčí, a/nebo snížení účinnosti prostředku.

Likvidace:

Znečištěné rohože by měly být likvidovány jako kontaminovaný zdravotnický materiál, v souladu s aktuálními předpisy.

Výrobce: AV Medical CZ s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 – Kunratice, Česká Republika

Tel.: +420 241 773 869

E-mail: info@avmc.cz

Web: www.avmc.cz

Datum vydání: 3. 1. 2022

