

NÁVOD na použití čepice na suché mytí vlasů

Čepice na suché mytí vlasů je ideálním řešením v situacích, kdy není možné umýt vlasy tradičním způsobem za použití vody.

Návod k použití a další doporučení:

Nasadte čepici na hlavu tak, aby zakrývala všechny vlasy a uši zůstaly volné. Poté jemně masírujte hlavu přes čepici, aby se přípravek rovnoměrně rozprostřel. Po 2–3 minutách čepici opatrně sejměte. Vlasy osušte ručníkem, abyste odstranili přebytečnou tekutinu. Upravte vlasy podle potřeby. Čepici lze použít přímo z obalu, nebo pro větší komfort ohřát celé balení v mikrovlnné troubě (max. 800 W) po dobu 15–20 sekund. Dbejte na to, aby nedošlo k přehřátí výrobku. Před použitím se ujistěte, že má výrobek vhodnou teplotu – zkontrolujte to přiložením vnitřní strany předloktí k materiálu čepice. Pokud je čepice příliš horká, počkejte, až vychladne.

Zvláštní opatrnost je nutná při použití u osob s citlivou pokožkou. Zamezte kontaktu s očima. V případě zasažení očí tekutinou okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody. Uchovávejte mimo dosah dětí. Použitou čepici vyhodte do směsného odpadu – nesplachujte ji do toalety.

Výrobek nevyžaduje namáčení ani oplachování. Určeno k jednorázovému použití.