

RÜSCH Balónkové katétry

Balónkový močový katétr

Typ Foley

Sterilní, pro jednorázové použití

Před použitím pečlivě čtěte příbalovou informaci!

Popis:

Základem všech katétrů jsou 2 až 3 lumeny s proximální trychtýřovitou násadou, inflační chlopni a zádržným balónkem na distálním konci. Objem náplně balónku je udáván v ml a velikost násady je udávána ve stupnici French gauge (Fr.), Charrière (Cg.), nebo milimetrech (mm), uvedeno na zakončení každého katétru. Typ distálního zakončení katétru je uváděn na jednotlivých obalech a/nebo na vnějším balení. Velikosti jsou v rozmezí od 6 do 30 Ch./Fr. Délka od 20 do 45 cm.

Některé pediatrické balónkové katétry obsahují zaváděcí drát pro usnadnění zavádění v případě potřeby.

Upozornění:

Předem naplněná stříkačka slouží pouze k naplnění balónku katétru, nikoliv jako injekce.

RÜSCH SympaCath balónkový katétr vyroben z latexu potaženého hydrogelem. Hydrogelová vrstva je po navlhčení kluzká. Díky tomu je minimalizováno tření povrchu katétru a zavádění je pro pacienta příjemnější.

RÜSCH AquaFlate Brilliant balónkový katétr vyroben z materiálu SILIKOMED® (silikon) s přibalenou předem naplněnou stříkačkou.

RÜSCH Aqua Flate SympaCath balónkový katétr vyroben z latexu potaženého hydrogelem s přibalenou předem naplněnou stříkačkou.

RÜSCH BRILLIANT balónkový katétr vyroben z materiálu SILIKOMED® (silikon).

RÜSCH ProfilCath, BRILLIANT balónkový katétr vyroben z materiálu SILIKOMED® (silikon) s profilovaným lumenem.

RÜSCH SSC-Cath, balónkový katétr vyroben z materiálu SILIKOMED® (silikon) potažený stříbrem.

RÜSCH SL-Cath, balónkový katétr vyroben z materiálu SILIKOMED® (silikon) impregnovaný stříbrem.

RÜSCH SILASIL, balónkový katétr vyroben z latexu, vnitřní a vnější otěru odolná silikonová vrstva.

RÜSCH-GOLD, balónkový katétr vyroben z materiálu SILIKOLATEX®.

RÜSCH TUR, balónkový katétr vyroben z materiálu SILIKOLATEX®, se spirálou.

RÜSCH-X-RAY, balónkový katétr vyroben z materiálu SILIKOLATEX®, bílý, nepropouštějící záření.

RÜSCH balónkový katétr vyroben z materiálu SILIKOLATEX®, červený, polotuhý.

RÜSCH balónkový katétr vyroben z gumy ROBUSTA, pokrytý materiálem SILIKOLATEX®, balónek vyroben z materiálu SILIKOLATEX®.

RÜSCH balónkový katétr vyroben z měkké gumy, potažen materiálem SILIKOLATEX®, balónek vyroben z materiálu SILIKOLATEX®.

RÜSCH WIRUTHAN® polyuretanový katétr s latexovým balónkem, (obsahuje latex).

Indikace

Tyto katétry jsou určeny pro běžnou drenáž močového měchýře, nebo běžnou pooperační drenáž a proplachy močového měchýře.

Kontraindikace

Pokud je uvedeno, některé produkty obsahují latex.

Upozornění

Tyto produkty obsahují přírodní latex, který může způsobit alergickou reakci.

Příprava použití

Za použití sterilní techniky vyjměte katétr z obalu.

Vizuálně zkontrolujte katétr, zda není mechanicky poškozen.

Před aplikací zkontrolujte balónek. Po zkontrolování musí být balónek úplně vyprázdněn.

K naplnění balónku požívejte pouze sterilní vodu, nebo přibalenou, předem naplněnou stříkačku.

Poznámka:

Zkontrolujte konec katétru před zavedením pediatrického balónku, aby jste se ujistili, že je vodící drát umístěn ve správné poloze uvnitř katétru a neprokluzuje. O správné pozici se ujistíme tak, že špička vodícího drátu není viditelná otvorem katétru, ale lze sledovat, že touto pozicí prošla. Pokud chcete použít vodící drát pro zavedení, nevyjímejte jej z katétru a nepokoušejte se jej znovu zavést. Znovuzavedení vodícího drátu je velmi obtížné, může protrhnout katétr, což může při zavedení vést k poranění močové trubice.

Návod k použití

Potřete katétr lubrikantem, nebo gelem na vodní bázi (podle potřeby použijte lokální anestetikum).

Za použití sterilní techniky (jak je uvedeno v odborné literatuře) zcela zasuněte katétr do močové trubice a ujistěte se, že je balónek za hrdlem močového měchýře.

RÜSCH SympaCath: doporučujeme před použitím katétru navlhčit.

Poznámka

Jakmile se ujistíte o správném zavedení pediatrického balónku, vyjměte vodící drát. Při odstraňování vodícího drátu dbejte na to aby jste neuvolnili katétr. Vodicí drát vyjměte před naplněním balónku. Ujistěte se, že se po vyjmutí vodícího drátu katétr nevysunul z močového měchýře. K naplnění balónku lze použít stříkačku Luer, nebo pro některé katétry také stříkačku Luer Lock. Součástí balení některých produktů je předem naplněná stříkačka. Balónek naplňte sterilní vodou, nebo použijte přibalenou, předem naplněnou stříkačku. Kapacita balónku je udávána na zakončení katétru, případně na obalu. Nepřeplňujte. O správném fungování se ujistěte kontrolou odtékání moči z drenážního konce.

K vypuštění balónku před vyjmutím použijte odpovídající stříkačku se zakončením Luer, nebo Luer Lock. Pro odstranění opatrně natáhněte inflační tekutinu stříkačkou. Vyhněte se bezpodmínečně nadměrné aspiraci, která může vést k vakuovému kolapsu plicního lumen a tím k poruše drenáže.

Upozornění týkající se všech balónkových katétrů s těsně zasazenou manžetou a objemem menším, než 50ml:

Důležité informace k odstraňování katétru:

Po úplném vyprázdnění balónku jej znovu naplňte 2 ml vzduchu, aby jste zabránili zadržení distálního balónku.

Maximální počet zavedení se liší podle typu produktu. Pro bližší informace kontaktujte prosím nejbližšího zástupce firmy RÜSCH.

Naplněný balónek udržuje katétr v měchýři. Pokud z balónku uniká tekutina, např. prosakováním plnicí tekutiny membránou balónku, může katétr z měchýře vypadnout. Toto je možné zvláště při použití silikonových katétrů, které jsou plněny sterilním roztokem, vzhledem k charakteru materiálu. Aby jste zabránili tomuto riziku, odsajte plnicí tekutinu nejméně jednou týdně a balónek ihned znovu naplňte daným množstvím tekutiny.

Možné komplikace

Vodící drát může být těžko odstranitelný, v případě, že je pediatrický balónkový katétr ohnutý, případně zalomený v močovodu.

V případě, že se během plnění balónku stříkačkou objeví komplikace, což se stává velmi ojediněle, ostrými nůžkami odstříhnete lumen katétru s ventilem v místě rozvětvení, popřípadě protrhnete balónek, jak je popsáno v odborné literatuře. V případě, že je nutné balónek protrhnout, ujistěte se, že jste odstranili všechny jeho části z měchýře.

Nesprávné umístění katétru může způsobit poškození močové trubice v případě naplnění balónku uvnitř močové trubice.

U některých pacientů bylo popsáno podráždění močové sliznice, ucpání katétru krystalickými nánosy případně infekce způsobené materiálem, z jakého je katétr vyroben. Pacienta monitorujte v souladu s platnými postupy a katétr vyjměte v odpovídajícím termínu určeném lékařem, případně jiným kvalifikovaným pracovníkem.

Upozornění

Určeno pouze pro urologické účely.

Vysunutí vodícího drátu z ústí pediatrického balónkového katétru v průběhu aplikace může protrhnout, nebo poškodit močovou trubici.

Nepoužívejte lubrikanty, nebo jiné přípravky na ropné bázi a produkty, které obsahují latex. Pro lubrikaci produktů obsahujících latex použijte silikonový sprej, lubrikant, nebo gel na vodní bázi.

Balónek plňte pouze sterilní vodou, případně použijte přiloženou předem naplněnou stříkačku.

Nikdy nesvírejte katétr, v případě nutnosti použijte ventil katétru, nebo zátku.

Nikdy nepoužívejte injekci k propíchnutí katétru pro odebrání vzorku moči. Jehla může způsobit poranění, nebo poškození katétru.

Dodání

Každý produkt je dodáván v samostatném sterilním obalu.

Sterilnost produktu je garantována pokud balení nebylo otevřeno, či poškozeno.

Všechny tyto produkty jsou určeny pouze pro jednorázové použití. Nepožívejte opakovaně. Nesterilizujte opakovaně.

Způsob uchovávání

Produkty uchovávejte v originálním balení na suchém místě, mimo dosah přímého zdroje světla a tepla.