

INCIDIN® WIPES - SYSTÉM VLHČENÝCH UTĚREK

Utěrky Incidin® Premium / Incidin® Basic Zásobník na utěrky Incidin®

K profesionálnímu čištění a dezinfekci ploch všeho druhu

Systém vlhčených utěrek Incidin® sestává z univerzálně použitelného dávkovacího zásobníku utěrek a z utěrek z netkané textilie ve dvou kvalitách Incidin® Premium a Incidin® Basic.

Utěrky Incidin® jsou určeny pro plošnou dezinfekci v kombinaci s dezinfekčními prostředky Ecolab. Tento systém umožňuje maximálně jednoduché a uživatelsky příjemné provádění dezinfekce povrchů.

- ▲ Dávkovací zásobník utěrek Incidin®
 - Opakovaně uzavíratelný a těsný
 - Odolný proti účinkům dezinfekčních prostředků
 - Vybavený výměnným uzavíracím víčkem
- ▲ Utěrky Incidin® Premium
 - vysoce kvalitní utěrky z netřepivé netkané textilie
 - Dodávají se v roli obsahující 99 utěrek o velikost 20 x 38 cm, 60 g/m²
- ▲ Utěrky Incidin® Basic
 - kvalitní utěrky s děrovanou strukturou zajišťující dobrý čistící účinek
 - Dodávají se v roli obsahující 99 utěrek o velikost 20 x 38 cm, 40 g/m²




Incidin® Wipes - systém vlhčených utěrek

K profesionálnímu čištění a dezinfekci ploch a povrchů

Utěrky Incidin® pro rychlou dezinfekci povrchů

Naše nabídka	Vaše výhoda
Utěrky jsou analyticky a mikrobiologicky testovány v laboratoři a uzpůsobeny pro použití v kombinaci s dezinfekčními prostředky Incidin Pro, Incidin® Plus, Incidin® Extra N, Incidin® Rapid, Incidin® Liquid, Incidin® Foam, Incidin OxyFoam S	Optimální vlastnosti, pokud jde o bezpečnost a používání v kombinaci s osvědčenými prostředky pro plošnou dezinfekci dodávaných společností Ecolab.
Dávkovací zásobník je vyroben z vysoce kvalitního materiálu, který lze umývat v mycích strojích a je odolný proti účinkům dezinfekčních prostředků.	Systém utěrek Incidin® lze dokonale začlenit do stávajících systémů plošné dezinfekce obsahujících produkty Ecolab
Uzavírací víčka se dodávají ve čtyřech barvách: zelené (standardní provedení), žluté, modré a červené (v rámci speciální objednávky). Uzávěry je navíc možno samostatně vyměňovat.	Prostřednictvím barevného kódování lze jednoznačně rozlišovat jak mezi různými dezinfekčními prostředky tak i mezi různými oblastmi použití.
Roztoky produktů Incidin® Pro, Incidin® Plus, Incidin® Extra N, Incidin® Rapid a je možno používat v doporučených koncentracích. Produkty Incidin® Liquid, Incidin® Foam a Incidin OxyFoam S je nutno používat vždy v neředěném stavu.	V podobě utěrek Incidin® používaných v kombinaci s osvědčenými produkty je k dispozici uživatelsky příjemný a flexibilní systém umožňující efektivní a rychlou formu aplikace dezinfekčních prostředků.

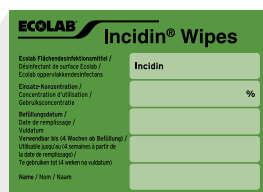

Pro každé opakované plnění zásobníku utěrkami z netkané textilie jsou v balení navíc obsaženy originální bezpečnostní etikety pro odpovídající označení dávkovacího zásobníku utěrek (produkt, datum naplnění, ředění apod.).

Produkty



Aplikace



Servis



Bezpečnost



Produkt	koncentrace %	expozice
Incidin rapid	0,25% / 0,5% / 0,75%	60 / 30 / 5 min
Incidin plus	0,5% / 1% / 2%	60 / 30 / 15 min
Incidin extra N	1% / 1,5% / 2%	60 / 30 / 15 min
Incidin Pro	0,5% / 1%	30 / 15 min

Produkt	koncentrace %	expozice
Incidin liquid	100%	5 min
Incidin foam	100%	1 min
Incidin Oxyfoam S	100%	5 min

DISTRIBUTOR:

ECOLAB s.r.o.
Vocářova 2449/5,
Libeň 180 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 602 156 877
www.ecolab.com




ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein Germany
tel.: +41 (0) 2173 599 0
www.de.ecolab.eu

POKYNY A DOPORUČENÍ K POUŽITÍ




Oblékněte si rukavice a sejměte víčko. Před opětovným naplněním zásobník důkladně vyčistěte.

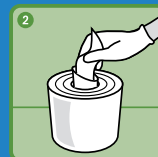

Vyjměte roli utěrek z netkané textilie z obalu a ze středu svitku povytáhněte první utěrku.



Roli utěrek Incidin® Premium nebo Incidin® Basic vložte do dávkovacího zásobníku.

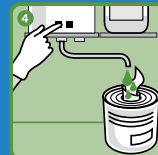

Naplňte dávkovací zásobník roztokem prostředku pro plošnou dezinfekci: Incidin® Pro, Incidin® Plus, Incidin® Extra N, Incidin® Rapid, požadované aplikační koncentraci. Plňte-li zásobník dezinfekčními

prospědky Incidin® Liquid, Incidin® Foam nebo Incidin OxyFoam S nechejte je v neředěném stavu. Při použití utěrek Incidin® Premium naplňte 2,3 až 2,5 litru roztoku, při použití utěrek Incidin® Basic naplňte 2,0 až 2,2 litru roztoku.



Protáhněte první utěrku otvorem ve víčku a poté tímto víčkem uzavřete nádobu dávkovacího zásobníku. Po naplnění dávkovacího zásobníku roztokem počkejte 30 až 60 minut, aby všechny utěrky optimálně nasákly.



Utěrky napuštěné roztokem je možno používat 28 dnů (Incidin Oxyfoam S 31 dnů). Po každém naplnění nalepte na dávkovací zásobník bezpečnostní etiketu opatřenou odpovídajícím popisem.

INFORMACE K OBJEDNÁVÁNÍ

Produkt	Balení	Číslo položky
Dávkovací zásobník utěrek Incidin®	1 kus v kartonu	100 13 607
Utěrky Incidin® Premium	6 rolí po 99 utěrkách v kartonu	100 10 279
Utěrky Incidin® Basic	6 rolí po 99 utěrkách v kartonu	100 10 278

HEADQUARTER:

ECOLAB EUROPE GMBH
Richtstrasse 7 8304 Wallisellen
Switzerland tel.: +41 (0) 44 877 2001
www.ecolab.com